


※コピーしてお使いください。 ※点検結果の記録は、直近3ヶ月程度の保管が望ましいとされています。

毎日の点検

⚠注意

毎日、毎月の点検は、AED本体の電源ボタンを押さずにご確認ください。

ステータスインジケータが緑色に点滅していることを確認します。

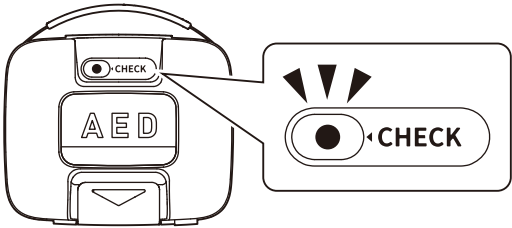

年

月

〈記入例〉

1月23日

☒ 緑

緑色点滅していればチェックします。

ステータスインジケータが緑色に点滅していないときは、救命に使用できない場合があるため、ただちにAEDカスタマーサポートセンター(TEL:0120-401-066 24時間対応)に連絡してください。

日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑
月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑
月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑
月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑	月 日 ☐ 緑

毎月の点検

点検日: 年 月 日

次回の点検日: 年 月 日

1. 外観の点検

☐ 汚れや破損、変形などがいないこと

2. ステータスインジケータの確認

☐ ステータスインジケータが緑色に点滅していることを確認する

3. 除細動パッド・バッテリー交換時期

- ☐ 「期限管理タグ」がAED本体に、交換時期が見えるように取り付けられている
- ☐ 「期限管理タグ」を確認し、AED本体に接続されている除細動パッドやバッテリーの交換期限が過ぎていない

☐ パッド期限	交換時期：	年	月	
☐ バッテリー装着日	交換時期：	年	月	日
☐ AED 設置日	交換時期：	年	月	日
☐ 予備 パッド①期限	交換時期：	年	月	
☐ 予備 パッド②期限	交換時期：	年	月	
☐ 予備 パッド③期限	交換時期：	年	月	

その他のユーザー点検

点検日: 年 月 日

- ☐ バッテリー装着テストの実施
- ☐ 付属品がそろっていること
- ☐ 設置環境の点検

☐ 温度範囲: -5~+50℃

☐ 湿度範囲: 5~95%RH (結露なきこと)

⚠注意

バッテリー装着テストを毎月実施するとバッテリー寿命が短くなる恐れがあります。