

倒れている人を見かけたら…

STEP 1 周囲の安全確認


周囲の状況が安全かどうか、上下左右前後すべての確認をします

STEP 2 反応の確認

傷病者の肩をたたきながら声をかけ、反応があるか確認します

STEP 3 応援を呼ぶ

大きな声で助けを呼び「119 番」「AED」「応援」を依頼します

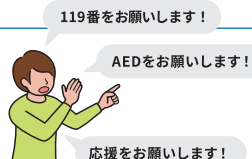

STEP 4 呼吸の確認

胸と腹部が動いているか、普段どおりの呼吸かどうか、10 秒以内に確認します

呼吸なし／判断に迷う

呼吸あり

様子をみながら応援・救急隊を待ちます

STEP 5 胸骨圧迫 (心肺蘇生法)


胸骨圧迫は非常に体力を消耗します。
可能であれば周囲の方と協力しながら交代で行うようにしてください。



胸骨圧迫

- ・胸の真ん中
- ・100 回～120 回／分のリズム
- ・小学生～大人 約 5cm の深さ
- ・未就学児 胸の厚みの 1/3 の深さ
- ・絶え間なく圧迫

小学生～大人

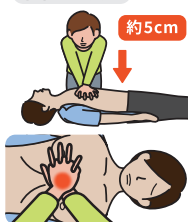

未就学児



※可能であれば胸骨圧迫 30 回の後に人工呼吸を 2 回、繰り返し行う

STEP 6 すみやかにAEDを装着



2026年6月発行

販売業者
オムロンヘルスケア株式会社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目3番13号品川フロントビル

(AA321) ①00 ②2606

製造販売業者
フクダ電子株式会社 〒113-8483 東京都文京区本郷3-39-4

OMRON



bilingual AED Life-Saving Quick Guide

AED救命クイックガイド

AEDカスタマーサポートセンター

製品に関するお問い合わせ

※別売品のお求めは、
購入店にお問い合わせください。

TEL 通話料無料 0120-401-066

- E-MAIL aed-cpr@omron.com
- Web <https://www.aed.omron.co.jp/>



JRC 蘇生ガイドライン2020 対応

耳マーク



このAEDは耳マークの
承認を得ています。

1

キャリングケースを開けて
電源ボタン④を押す。

※ 言語切替ボタン⑤を押すと、音声の言語を日本語 / 英語で切り替えてきます

Open the AED case and press the POWER button.

※ Press the language switch button to toggle between Japanese and English.



2

キャリングケースにある除細動パッドの袋を開け、中から除細動パッドを取り出す。

Take the pad package you will find in the carrying case, open it, and remove the defibrillation pads.



3

除細動パッドを傷病者の胸に貼り付ける。
赤い除細動パッドを右胸、青い除細動パッドを左脇腹に貼り、肌にしっかり押し付ける。

Place the red pad on the right chest and the blue pad on the left side of the abdomen, and press them firmly against the skin.



4

「身体に触らないでください」の音声流れたら、傷病者の身体から手を離し、離れる。

The AED will prompt "Do not touch the patient." At this, remove your hands from the patient and stand clear from the patient.



電気ショックが必要な場合 For applying electric shock when needed

5

「点滅しているショックボタンを押してください」の音声流れたら、傷病者の体に誰も触れていないことを確認し、ショックボタン⑥を押す。

With the AED prompt "Press the flashing SHOCK button," make sure no one is touching the patient and press the SHOCK button.



6

「心肺蘇生を始めてください」の音声流れたら、除細動パッドを貼ったまま、ただちに胸骨圧迫を開始する。

When the AED prompts "Start CPR," begin chest compressions right away with the pads remaining in place on the patient's chest.



電気ショックが不要な場合 If electric shock is not needed

ショックボタンは点滅せず、ただちに胸骨圧迫を開始する。

The SHOCK button will not flash. Immediately start chest compressions.



傷病者が未就学児の場合 In case of a preschool child

傷病者モード切り替えスイッチを「未就学児」に切り替え、除細動パッドを、胸の中央と背中中央の中央に貼り付ける。

Move the Patient Mode Selector Switch to "Preschooler" and place one pad in the center of the child's chest and the other pad in the center of the child's back.

