


除細動パッドパック取付時は必ずご確認ください

除細動パッドパックを本体に取り付けるときは、以下のことを必ずご確認ください。


パッドパックを取り付ける前に

本体端子部にある**金属ピン**の状態をご確認ください。

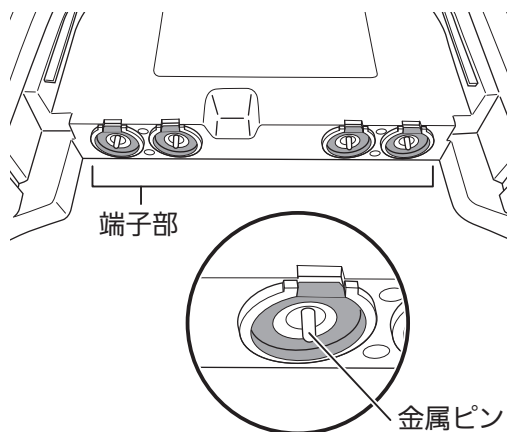


■ 確認のしかた

- 1 本体を裏返してください。

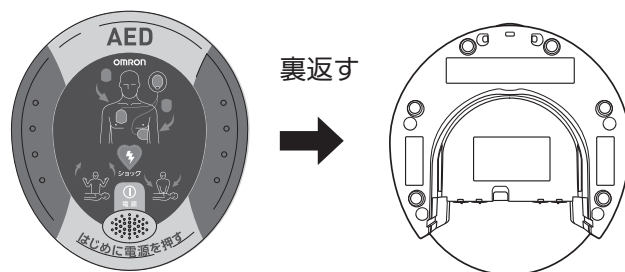


- 2 右図のように、金属ピンが上を向くように本体をお持ちください。

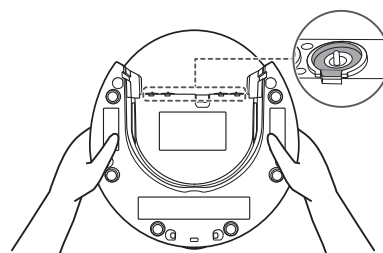

- 3 本体に対して垂直方向から見て、金属ピンの状態をご確認ください。


< 本体を側面から見た図 >

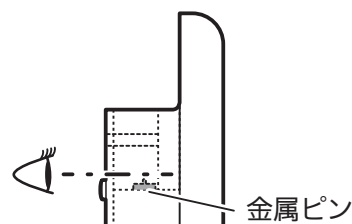

○ 金属ピンの高さがすべて揃っている




✕ 金属ピンの高さが揃っていない

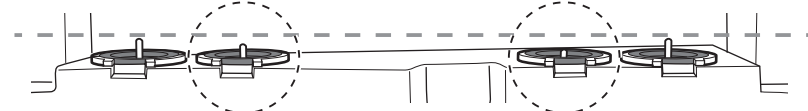

(裏面に続きます)

パッドパックを取り付けたあとに



パッドパックを取り付けたあと、以下の内容をご確認ください。

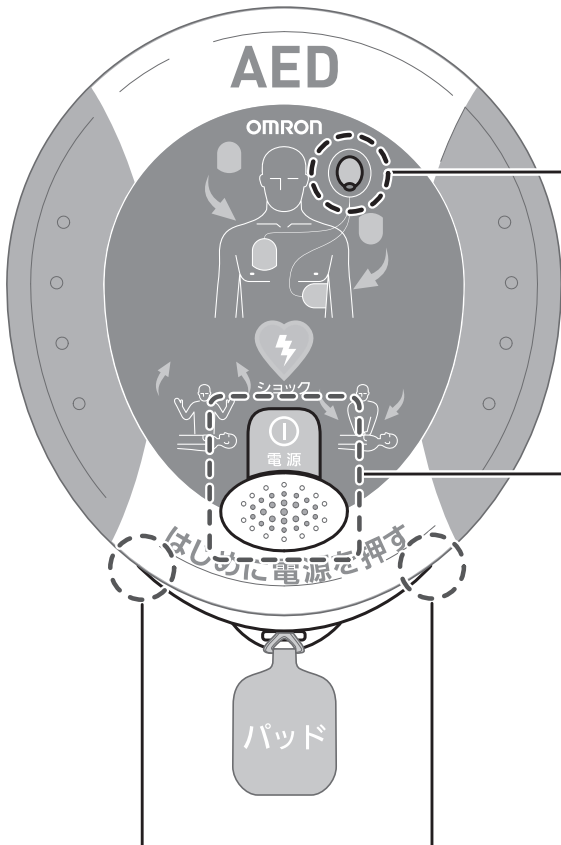

スタンバイ表示は緑色に点滅していますか？

電源ボタンを押したとき、
「ただちに 119 番に電話してください。」
という音声スピーカーから流れましたか？
・確認後は電源ボタンを押して電源を切ってください。

パッドパックのツメ(左右)は完全にロックされていますか？

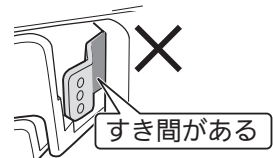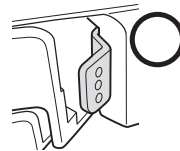

端子部にある金属ピンの高さが違う、スタンバイ表示が赤色に点滅するなどの異常をご確認されましたら、

AED カスタマーサポートセンター 0120-401-066 (24 時間対応)

までご連絡ください。