


日常点検項目表 点検方法

■毎日の点検

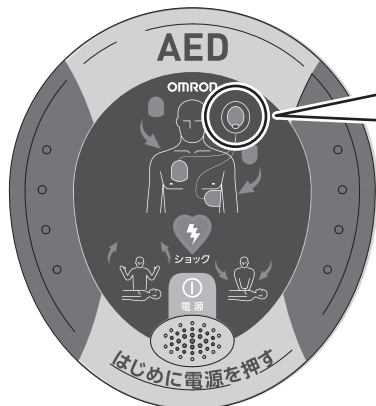

スタンバイ表示が緑色に点滅していることを確認してください。

- ▲注意** 電源ボタンは押さず目視でご確認ください。
 毎回電源ボタンを押すと、バッテリー寿命が短くなったり、「メモリーがいっぱいです」の音声ガイドが流れたりする場合があります。


■毎月の点検

外観の点検

- 本体にひび割れやがたつきなど物理的損傷の兆候がないことを確認してください。


除細動パッドパックの点検

- パッドパックが装着されている状態のまま押し込んでください。

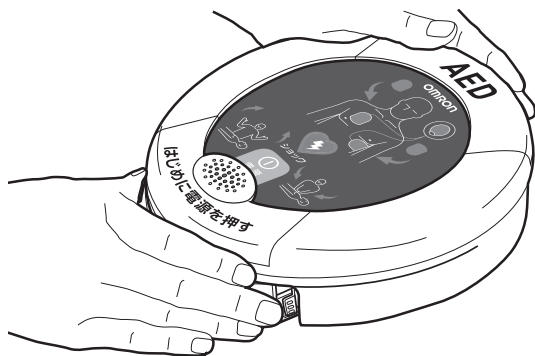

本体上部を押さえ、除細動パッドパックを2本の指で強く押し込んでください。


- パッドパックのツメの状態を確認してください。

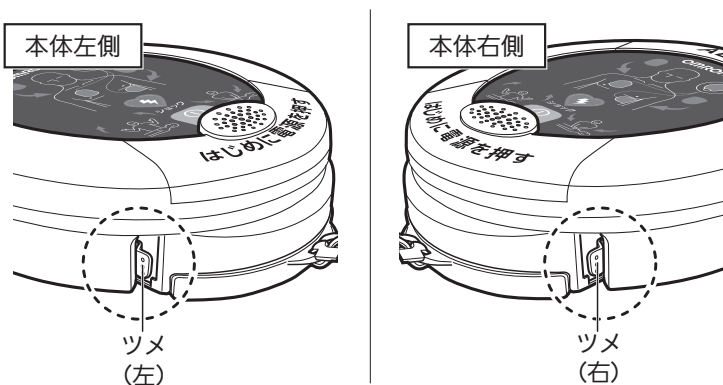

パッドパックのツメ(左右)は完全にロックされていますか？
 <パッドパックのツメ(右)の場合>



ツメが上図「O」のようにロックされているときは、パッドパックは正しく接続されています。

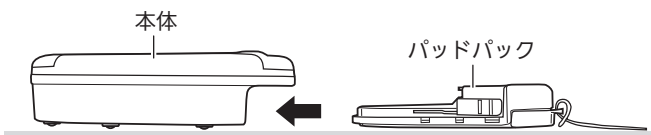

正しく接続されていない場合は、一旦パッドパックを本体から取り出し、本体を平らな場所に置き、パッドパックをまっすぐに差し込み直してください。

その際、左右(両方)のツメが「カチッカチツ」と音がし、左右(両方)のツメにすぎ間がないことを確認してください。


(裏面に続きます)

- 使用期限（パッドパック裏面に記載）が切れていないこと、および「交換時期表示ラベル」の交換時期と一致していることを確認してください。
- 予備のパッドパックがある場合、その使用期限が切れていないこと、および「交換時期表示ラベル」の交換時期と一致していることを確認してください。
- 「交換時期表示ラベル」が、交換時期の表示側が見えるようにキャリングケースに取り付けられていることを確認してください。



LED 表示と音声の点検

- 本体をキャリングケースに入れ、スタンバイ表示が緑色に点滅していることを確認してください。
- 本体の上下をひっくり返し、その状態のまま ①～③ を行ってください。

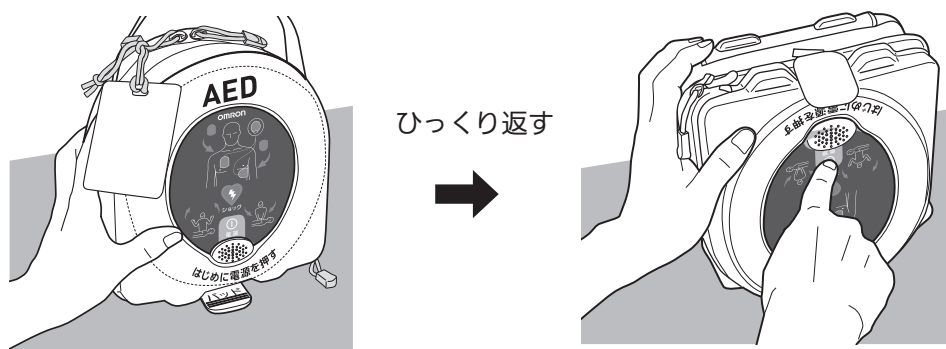

- ① 上図のように上下逆になっていることを確認したうえで、電源ボタンを押して電源を入れてください。
- ② LED が点灯すること、「ただちに 119 番に電話してください。」が聞こえることを確認して、すぐに電源を切ってください。

▲ 注意

電源を入れてから 10 秒以内に必ず電源を切ってください。
バッテリー寿命が短くなる恐れがあります。

- ③ その状態（上下逆）のまま、スタンバイ表示が緑色に 30 秒以上（少なくとも 7 回）点滅することを確認してください。確認後、元の向きに戻してください。

付属品の点検

- 付属品がそろっていることを確認してください。

設置環境の点検

- 設置場所が、清潔で水のかからない所であり、かつ下記の環境条件を満たしていることを確認してください。

温度範囲：0～+50℃

湿度範囲：5～95%RH（結露なきこと）

スタンバイ表示が赤色に点滅する、ピープ音が鳴る、スタンバイ表示が緑色に点滅していない、LED が点灯しない、音声がでない、などの異常がある場合は、ただちに、

AED カスタマーサポートセンター 0120-401-066 (24 時間対応)

までご連絡ください。