

# 倒れている人を見かけたら…

2020年ガイドライン対応

1

## 周囲の安全確認



上下左右前後すべての安全確認をします。

2

## 反応の確認



肩を軽くたたきながら大声で呼びかけます。

3


## 大声で叫び 応援を呼ぶ



119番通報と、AED、応援者を呼ぶことを依頼します。

4

## 呼吸の確認

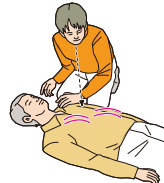


胸と腹部の動きを素早く(10秒以内で)見ます。普段どおりの呼吸でなければ“呼吸なし”と判断します。

呼吸がなければ…

呼吸があれば…

## 5 ただちに胸骨圧迫

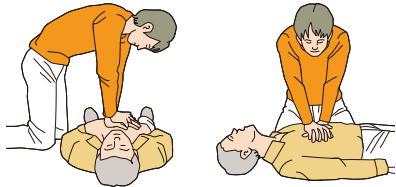


ただちに、胸骨圧迫を行います。

ひじを伸ばし、垂直に体重をかけ、成人は深さ約5cm、小児は胸の厚さの約1/3胸が沈み込むように、1分間に100～120回のテンポで強く速く胸を押します(中断は最小にする)。胸を完全に元の位置に戻すために、圧迫と圧迫の間に胸壁に力がかからないようにします。

人工呼吸の技術と意志がある場合のみ、胸骨圧迫30回、人工呼吸2回のサイクルの繰り返しを行います。  
人工呼吸の技術と意志がない場合は胸骨圧迫のみを行います。

### 胸骨圧迫のポイント

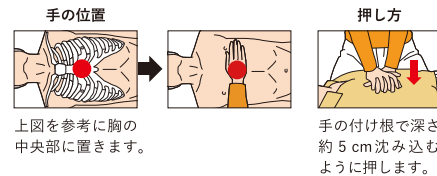

上図を参考に胸の中央部に置きます。

手の付け根で深さ約5cm沈み込むように押します。




普段どおりの呼吸があれば、上図の姿勢で横に寝かせ、気道を確保し、応援・救急隊を待ちます。

## 6 すみやかにAEDを装着

AEDが到着したら、すみやかに装着します。

救急隊に引き継ぐまで、または傷病者に呼吸やいやがるなどの目的のあるしぐさが認められるまで、胸骨圧迫と、できる場合は人工呼吸をつづけます。

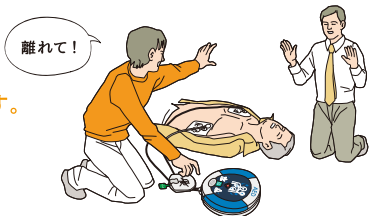

AEDによる心電図解析と電気ショックを行う際は、傷病者に触れないようにしてください。  
救急隊が到着するまで、AEDの除動パッドは付けたままにしてください。

自動体外式除動器 レスキューハート HDF-3500 | 選任製造販売業者 オムロンヘルスケア株式会社 | 外国特別承認取得者 HeartSine Technologies Limited

2023年12月発行

©OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 2019. All Rights Reserved.

GZ064 ①VN P2312

multilingual

# AED 救命クイックガイド

AED Life-Saving Quick Guide

AED 救急快速指南

AED 구명 퀵가이드



2020年ガイドライン対応



耳の不自由な方もお使いいただけます。

## AEDカスタマーサポートセンター

製品に関するお問い合わせ

※別売品のお求めは、購入店にお問い合わせください。

TEL 通話料無料 0120-401-066

E-MAIL aed-cpr@omron.com

WEB <https://www.aed.omron.co.jp/>

All for Healthcare



ケースから出さずに使えます。 You can use this AED without removing it from the case. 不要从箱子中取出 / 케이스에서 꺼내지 않고 사용



- 1** 電源ボタンを押し、緑のつまみを引っ張る。  
Press green button to turn on. Pull green knob.  
打开电源，下拉绿色捏片  
전원을 켜고 녹색 손잡이를 당긴다.



- 2** 中からパッドを取り出す。  
Remove pads from the inside.  
从中取出电极片  
안에서 패드를 꺼낸다.



- 3** 青い矢印をつまみ、青色のシートをはがす。  
Hold the blue arrow and peel pads from blue liner.  
按箭头方向取下蓝色保护膜  
파란색 화살표를 당겨 파란색 스티커를 떼어낸다.



**2~4**  
左右交互に点滅した状態  
Left and right blinking  
左右交替闪烁  
좌우 교차 점멸 상태

- 4** パッドのイラストのように、右胸と左わき腹の素肌にしっかり貼る。  
Press pads firmly to patient's bare skin as shown in picture of the pads.  
按电极片上的标示位置，将电极片分别黏贴于患者的右胸部上方及左胸部下方  
패드에 그려진 그림에 따라 오른쪽 가슴과 왼쪽 옆구리에 단단히 붙인다.



- 5** 心電図解析中、傷病者にさわらない。  
Assessing heart rhythm. Do not touch the patient.  
分析心率期间，请勿接触患者身体  
심전도 측정 중에는 몸을 만지지 않는다.



**⚠️ 電気ショックが必要な場合** Electric shock is necessary 当需要电击时 / 전기 쇼크가 필요한 경우



- 6** 傷病者に誰もさわっていないことを確認し、点滅したオレンジ色のショックボタンを押す。  
After check that nobody touch patient, press the flashing orange shock button.  
确认无人接触患者身体的状态下，按下闪烁的橙色电击键  
환자와 접촉한 사람이 없는 것을 확인한 후 점멸하는 주황색 쇼크 버튼을 누른다.



- 7** パッドを貼ったまま、ただちに胸骨圧迫を開始する。  
Continue chest compressions now still pressing pads.  
确认电极片黏贴于患者身体后，立刻持续实施胸外按压  
패드를 몸에 붙인 상태에서 즉시 흉부 압박을 계속한다.

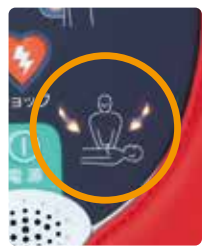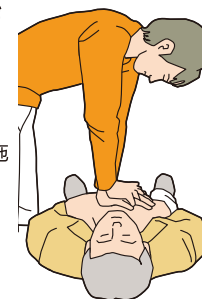

- 電気ショックが不要な場合** If electric shock is unnecessary 不需要电击时 / 전기 쇼크가 불필요한 경우  
ショックボタンは点滅せず、この部分が点滅。ただちに胸骨圧迫を開始する。  
The shock button does not blink, this part blinks. Start immediately chest compressions.  
电击按钮不闪烁，立刻持续实施胸外按压  
쇼크 버튼은 점등되지 않은 채 O 안에 그려진 그림이 점멸하므로 즉시 흉부 압박을 실시한다.